

# Anleitung zur Schockreinigung des Rohrleitungssystems bei Unterwasserlaufbändern mit Wassertank\*.

**Von:** Holger Metz

**Stand:** 2. April 2020

[www.metz-handel.de](http://www.metz-handel.de)

### Schritt für Schritt:

Um nicht zugängliche Stellen, wie beispielsweise das Rohrleitungssystem, zu reinigen, empfiehlt es sich eine Intensivreinigung mit Wasserklar durchzuführen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Laufband hochfahren
2. Altes Wasser ablassen
3. 150 ml (ca. ein kleines Glas) Wasserklar in den Vorratstank füllen
4. Vorratstank zu 1/4 mit Frischwasser auffüllen
5. Das Gemisch innerhalb der nächsten halben Stunde mehrmals zwischen Vorratstank und Therapiebecken hin- und her pumpen (Ventilstellungen beachten!); zwischendurch kurz einwirken lassen
6. Die Flüssigkeit ablassen oder abpumpen
7. Gegebenenfalls Rückstände entfernen
8. Vorratstank zu 1/4 mit Frischwasser auffüllen und nochmals zwischen Vorratstank und Therapiebecken hin- und her pumpen (Ventilstellungen beachten!); Vorgang bei Bedarf wiederholen
9. Wasser ablassen/abpumpen

Bitte achten Sie grundsätzlich darauf, dass das Wasserklar in der höher konzentrierten Form nicht zu lange im Rohrsystem lagert und diese Reinigung nur bei Notwendigkeit vorgenommen wird.

\* Für die Verträglichkeit von Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit einzelnen Unterwasserlaufband-Modellen und -Serien wird keine Gewähr übernommen. Im Zweifel beim Hersteller die Verträglichkeit erfragen.